



Neusspray Bijholteontsteking

eerste symptomen

Voorkomt en verlicht symptomen van bijholteontsteking

Algemene informatie

Lees deze informatie zorgvuldig door voordat je A.Vogel neusspray bijholteontsteking bij eerste symptomen gaat gebruiken. Gooi deze gebruiksaanwijzing niet weg omdat het belangrijke informatie bevat.

Gebruiken bij

A.Vogel neusspray bijholteontsteking bij eerste symptomen is een neusspray voor de preventie en behandeling van de symptomen van ontstekingen van het neusslijmvlies en de bijholten.

Indicatie

A.Vogel neusspray bijholteontsteking bij eerste symptomen is aangewezen voor de preventie en de behandeling van de symptomen van ontstekingen van het neusslijmvlies (rhinitis) en de bijholten (rhinosinusitis).

Contra-indicaties

A.Vogel neusspray bijholteontsteking bij eerste symptomen mag niet worden gebruikt in geval van overgevoeligheid voor med-Ectoïn® of een van de andere ingrediënten van het hulpmiddel. A.Vogel neusspray bijholteontsteking bij eerste symptomen mag niet worden gebruikt door patiënten met een lichaamsgewicht van minder dan 3,5 kg.

1. Wat is A.Vogel neusspray bijholteontsteking bij eerste symptomen en waarvoor wordt het gebruikt?

A.Vogel neusspray bijholteontsteking bij eerste symptomen is een hypertone zoutoplossing met med-Ectoïn®, med-Ectoïn® is een natuurlijk ingrediënt dat de neusslijmvliescellen beschermt, membraan-stabiliserend is en ontstekingen vermindert. Deze neusspray voorkomt en behandelt bijholteontsteking, opent de neus en sinussen, en verlicht symptomen zoals niezen, jeuk en korstvorming.

Dit product is klinisch bewezen effectief.

2. Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

Als allergische reacties optreden, moet het gebruik van A.Vogel neusspray bijholteontsteking bij eerste symptomen onmiddellijk worden gestaakt.

Niet gebruiken als de verpakking beschadigd of doorboord is. Uit hygiënisch oogpunt dient de neusspray slechts door één en dezelfde persoon te worden gebruikt.

Niet langer dan 3 maanden na opening gebruiken.

Niet gebruiken na de vervaldatum.

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Als de symptomen aanhouden of verergeren, raadpleeg dan een arts.

Als je een grotere hoeveelheid A.Vogel neusspray bijholteontsteking bij eerste symptomen hebt gebruikt dan geadviseerd, zijn er geen negatieve effecten te verwachten.

Als je ongemak ervaart, neem dan contact op met een arts.

3. Belangrijk om te weten voor het gebruik van A.Vogel neusspray bijholteontsteking bij eerste symptomen

A.Vogel neusspray bijholteontsteking bij eerste symptomen is bedoeld om door de gebruiker zelf te worden aangebracht.

A.Vogel neusspray bijholteontsteking bij eerste symptomen kan gelijktijdig worden gebruikt met andere al dan niet medicinale neussprays tenzij de gebruiksaanwijzing van het andere product anders voorschrijft.

4. Hoe gebruik je A.Vogel neusspray bijholteontsteking bij eerste symptomen?

Gebruik A.Vogel neusspray bijholteontsteking bij eerste symptomen altijd volgens deze instructies.

Tenzij anders voorgeschreven door je zorgverlener, gebruik je 1-2 sprays in elk neusgat meerdere keren per dag.

A.Vogel neusspray bijholteontsteking bij eerste symptomen is geschikt voor kinderen met een minimumgewicht van 3,5 kg.

Voor kinderen tot 10 kg is de dosering maximaal 10 sprays per dag. Kinderen van 10 jaar of jonger en personen die A.Vogel neusspray bijholteontsteking bij eerste symptomen niet zelfstandig kunnen gebruiken, dienen bij het aanbrengen van het product hulp te krijgen.

Voordat je A.Vogel neusspray bijholteontsteking bij eerste symptomen voor de eerste keer gebruikt of als de sprayfunctie verstoorde is, verwijder de beschermkap en druk het pompmechanisme 2-3 keer in een rechtopstaande positie om de lucht uit de pomp te halen. Knip de punt niet af!

1. Snuit je neus voorzichtig om je neusgaten schoon te maken.
2. Verwijder de beschermkap van de fles.
3. Houd de fles vast met je wijs- en middelvinger aan beide kanten van de vingersteun en je duim onder de fles. Buig je hoofd iets naar voren en sluit één neusgat door zachtjes tegen de zijkant van je neus te drukken met je vinger.
4. Plaats het uiteinde van de spray voorzichtig in je neusgat. Terwijl je de pomp snel en stevig indrukt, adem je zachtjes in door je neus.
5. Plaats het uiteinde van de spray in je andere neusgat.
6. Herhaal de hierboven beschreven stappen.
7. Veeg het blootgestelde uiteinde van de fles af met een schone, pluisvrije doek.
8. Plaats de dop terug op de fles.

5. Mogelijke bijwerkingen van A.Vogel neusspray bijholteontsteking bij eerste symptomen

A.Vogel neusspray bijholteontsteking bij eerste symptomen wordt goed verdragen. Er zijn tot nu toe geen regelmatig voorkomende of aanhoudende bijwerkingen bekend. Informeer jouw arts, apotheker en de fabrikant als je bijwerkingen opmerkt die mogelijk verband houden met het gebruik van A.Vogel neusspray bijholteontsteking bij eerste symptomen.

6. Hoe bewaar je A.Vogel neusspray bijholteontsteking bij eerste symptomen?

De vervaldatum van A.Vogel neusspray bijholteontsteking bij eerste symptomen staat op de doos en op de fles. A.Vogel neusspray bijholteontsteking bij eerste symptomen mag niet worden gebruikt na de vervaldatum. Bewaar A.Vogel neusspray bijholteontsteking bij eerste symptomen tussen 2 °C en 25 °C. Het product kan bij het restafval worden weggegooid.

7. Aanvullende informatie

Bij gebruik van A.Vogel neusspray bijholteontsteking binnen de beoogde toepassing, is er geen bewijs voor een specifiek risico tijdens zwangerschap en borstvoeding. Elk ernstig incident dat verband houdt met het product moet worden gemeld aan de fabrikant van het product via vigilance@bitop.de en aan de verantwoordelijke lokale bevoegde autoriteit. (Meldpunt van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)) 11508059-00



8. Inhoud

20 ml oplossing

Eén spray bevat 0,14 ml oplossing

Ingrediënten

2% med-Ectoïn®, zeezout, fosfaatbuffer (natriumdihydrogendifosfaat, dinatriumwaterstoffsfaat), water.

9. Houder van de handelsvergunning / Fabrikant

■ Fabrikant: bitop AG
Stockumer Str. 28, D-58453 Witten



☞ Distributeur: A.Vogel B.V.

J.P. Broekhovenstraat 16, NL-8081 HC Elburg

E: info@avogel.nl

10. Datum van gebruiksaanwijzing

De tekst van deze gebruiksaanwijzing is voor het laatst gewijzigd in februari 2025.

11. Verklaring van de gebruikte symbolen



Lotnummer



Te gebruiken tot (vervaldatum)



Temperatuurgrenzen



Medisch hulpmiddel



UDI-drager



Voor herhaald gebruik door één persoon



Niet gebruiken als de verpakking beschadigd of doorboord is



Gebruiksaanwijzing lezen



CE-symbool met nummer van de notified body



Fabrikant



Distributeur

Gezondheidsinformatie

Wie gezond wil leven eet gevarieerd en gezond, beweegt verantwoord en zorgt voor voldoende afwisseling tussen inspanning en ontspanning. Soms kan je lichaam even wat extra ondersteuning gebruiken. De natuurlijke producten van A.Vogel zijn met de grootste zorg en volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten gemaakt om jouw gezondheid te ondersteunen. Meer informatie over de producten? Kijk op www.avogel.nl of stuur een e-mail naar info@avogel.nl

Tips bij neusverkoudheid en een verstapte neus

- Kies voor voeding die rijk is aan vitaminen en mineralen.
- Vooral vitamine C is belangrijk voor de weerstand, net als voldoende rust, slaap en ontspanning.
- Gebruik A.Vogel neusspray bijholteontsteking bij eerste symptomen.
- Maak het slijm goed los door een stoombad te nemen.
- Gebruik niet te veel melkproducten, omdat deze de slijmproductie bevorderen. Zure zuivelproducten zoals karnemelk, kwark en yoghurt kunnen wel.
- Drink niet te koude dranken en eet niet laat op de avond nog een zware maaltijd.

A.Vogel, 100 jaar passie voor planten

Alfred Vogel reisde in zijn leven de hele wereld rond om planten te ontdekken. Zijn bevlogenheid en kennis van de positieve invloeden van planten waren indrukwekkend. In 1923 opende Alfred Vogel zijn eerste kruiden- en natuurwinkel in de Zwitserse stad Basel.

Nu, 100 jaar later, is de passie voor de positieve invloed van planten nog steeds onverminderd groot.

Natuurlijk gezond

Bij A.Vogel maken we natuurlijke zelfzorgproducten. De planten die in de ecologische A.Vogel tuinen op de Veluwe groeien, verwerken we in veel van onze producten. Jaarlijks oogsten onze tuinmannen zo'n 50.000 kilo planten op het moment dat de plant de hoogste concentratie aan werkstoffen bevat. De

kwaliteitsmedewerkers van het laboratorium testen dit uitvoerig. Direct na de oogst verwerken we de planten en maken we er hoogwaardige producten van. Door voortdurend onderzoek weten we dat planten vol actieve werkstoffen zitten. Dat fascineert ons. Hierdoor zijn we altijd op zoek naar hoe we de kracht van de natuur kunnen gebruiken in nieuwe toepassingen voor jouw gezondheid.

A.Vogel tuinen: EKO-keurmerk

Alles wat we in de A.Vogel tuinen doen, doen we met de grootste passie voor de natuur en jouw gezondheid. Zo kweken we al onze planten uitsluitend ecologisch (EKO-keurmerk), zonder kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen. Dat doen we om de natuur te sparen en onze ingrediënten zo zuiver mogelijk te houden.

In nauwe samenwerking met 's Heeren Loo helpen we mensen van de dagbesteding in 't Harde en omstreken aan een mooie en zinvolle invulling van de dag. Ze helpen ons namelijk met verschillende werkzaamheden in de A.Vogel tuinen. Van onkruid wieden, bemesten en oogsten tot assistentie in ons bezoekerscentrum. Het is een fijne samenwerking waar wij allemaal veel plezier aan beleven.

Zorg voor het milieu

A.Vogel streeft ernaar het milieu zo min mogelijk te belasten. Daarom maken we zoveel mogelijk gebruik van milieuvriendelijk geproduceerde verpakkingsmaterialen. Deze materialen hebben bij verbranding geen schadelijke effecten op het milieu of zijn geschikt voor recycling.



11508059-00

© 9300763 / 2581



Item description:

Neusspray
Bijholteontsteking,
20 ml (NL)

Famar item code:

11508059-00

Dimensions:

155x210 mm

Tech. draws:

St. 883, Zt. 883-1

Laetus code:

586

Colors:

- Pantone Process Black
- Pantone Process Black (10%)
- Diecut

Fontsize:

Text: 5,8
Spacing: 6,96

AW's proof version: v10

Date: 27-03-'25

Artwork approved

Date: 14-05-'25
By: Magda Visch

Artwork to printer

Date: 20-05-'25
By: Ricardo Reezigt