

soreFix®

Vaarwel koortslip, hallo glimlach

Rescue Koortslipcrème voor de behandeling van een koortslip in alle 4 de fases



Gepatenteerd zinkcomplex


SoreFix Rescue koortslipcrème bevat unieke ingrediënten met een bewezen effectiviteit in alle 4 de fases van een koortslip. Sorefix Rescue koortslipcrème verlicht de tinteling (jeuk), vermindert de lipblaasjes, verkort de duur van de uitbraak en voorkomt het breken van de korstjes (zie afbeelding in de blauwe balk). SoreFix Rescue koortslipcrème is een transparante crème waardoor de koortslip niet extra wordt geaccentueerd.

Dosering en gebruik

Voor het beste resultaat brengt u de crème dagelijks 3 tot 6 maal aan op het aangedane gebied van de lippen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. U brengt de crème aan wanneer de eerste symptomen verschijnen (tinteling, kloppend, pijnlijk en branderig gevoel) totdat de koortslip (inclusief de korstjes) in zijn geheel is verdwenen. Het wordt aanbevolen altijd uw handen te wassen voor en na het aanbrengen van de crème. Bij gebruik van lipstick wordt geadviseerd om SoreFix Rescue koortslipcrème minimaal 15 minuten van tevoren aan te brengen.

SoreFix Rescue koortslipcrème bevat natuurlijke oliën en is rijk aan vitamine E. De crème is vrij van sulfaten, vrije polyethyleen glycolen, TEA's, DEA's, parabenen en andere conserveringsmiddelen.

WAT DOET SOREFIX IN ALLE FASES VAN EEN KOORTSLIP?

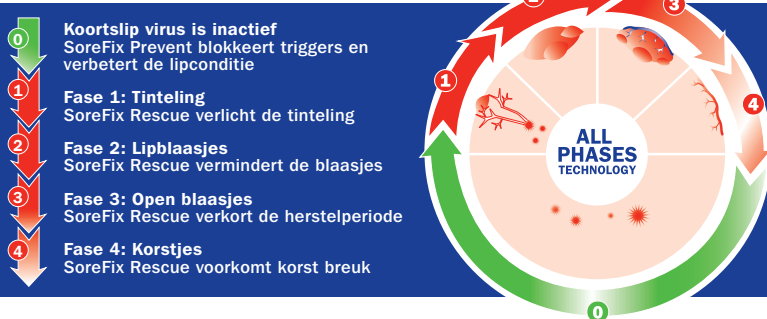

Ingrediënten:

Isostearyl isostearaat, Jojobaolie, Ethyleen/propyleen/styreen copolymeer, Ethylhexyl methoxycinnamaat, PEG-8 bijenwas, Octocryleen, Diethylamino hydroxybenzoyl hexyl benzoaat, Zinkoxide, Zinkricinoleaat, Zetmeel-aluminiumoctenylsuccinaat, Sucrose tetraesteraat triacetaat, Parfum, Tocoferylacetaat (vitamine E), Butyrospermum parkii (sheaboter), Butyleen/ethyleen/propyleen copolymeer, Microkristallijne wax, Punica granatum (granaatappel) zaadolie, BHT, Tri-ethoxycaprylsilaan.



Lot nummer en vervaldatum: zie doosje en tube



Medisch Hulpmiddel:
SoreFix® Rescue koortslipcrème is een gecertificeerd Klasse IIa medisch hulpmiddel



Buiten bereik van kinderen houden. SoreFix Rescue koortslipcrème kan tot 12 maanden na opening gebruikt worden.

Laatste update gebruiksaanwijzing: november 2020

Lees de gebruiksaanwijzing voordat u SoreFix Rescue koortslipcrème toepast, ook als u dit product al eerder heeft gebruikt. De informatie kan, sinds uw laatste gebruik, gewijzigd zijn als gevolg van nieuwe onderzoeksresultaten. Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig.

Waarschuwingen voor gebruik:

- Een koortslip is zeer besmettelijk. Wees daarom extra voorzichtig in het contact met anderen, voornamelijk met baby's en kleine kinderen.
- Gebruik SoreFix Rescue koortslipcrème uitsluitend voor uzelf om besmetting van anderen te voorkomen.
- SoreFix Rescue koortslipcrème is uitsluitend geschikt voor uitwendig gebruik op en rond de lippen.
- Gebruik SoreFix Rescue koortslipcrème niet in geval van allergie of overgevoelighed voor één of meer van de ingrediënten. Stop onmiddellijk met het gebruik wanneer er irritatie of een allergische reactie ontstaat. Indien de symptomen aanhouden, neem dan contact op met uw huisarts.
- Gebruik SoreFix Rescue koortslipcrème tijdens de zwangerschap alleen na overleg en onder begeleiding van een arts. SoreFix Rescue koortslipcrème kan tijdens borstvoeding worden gebruikt.
- SoreFix Rescue koortslipcrème is geschikt voor volwassenen en kinderen vanaf 4 jaar.
- Neem contact op met uw huisarts als de koortslip na twee weken niet is verbeterd en stop met het gebruik van het product.

Bijwerkingen:

SoreFix Rescue koortslipcrème wordt over het algemeen goed verdragen.

Let op:

In verband met het gebruiksgemak is de tube groter dan de inhoud. De tube bevat 6 ml crème. Druk voor het eerste gebruik voorzichtig de aanwezige lucht uit de tube.

KOORTSLIP TRIGGERS:



Besmetting



Zonlicht / UV-straling



Stress



Hormonale veranderingen



Vermoeidheid



Schrale of droge lippen



Extreme kou



Verminderde weerstand

Voorkomen van een koortslip:

Om een koortslip te voorkomen en de conditie van uw lippen te verbeteren kunt u dagelijks SoreFix Prevent koortslip balsem (potje, 8 ml) gebruiken. SoreFix Prevent is een verzorgende koortslip balsem met een UV-filter (SPF 30) met een bewezen effectiviteit in het voorkomen van een koortslip wanneer er sprake is van een hoger risico op een uitbraak.



Ga voor meer informatie naar www.sorefix.nl

Serrix BV
Heregracht 458,
1017 CA, Amsterdam,
Nederland

Serrix
L024NL106