

NL Lees de gehele gebruiksaanwijzing voordat u Mycosan Kalknagel Behandel + Camoufleur set gebruikt, ook als u al bekend bent met dit product. De informatie kan, sinds uw laatste gebruik, gewijzigd zijn als gevolg van nieuwe onderzoeksresultaten. Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig.

MYCOSAN



DIABETICI
GESCHIKT

Behandel + Camoufleur

Klinisch bewezen Behandelset voor kalknagels

Geschikt voor diabetici en kinderen vanaf 4 jaar.

Mycosan Kalknagel Behandel + Camoufleur bevat:

- Mycosan Kalknagel Behandelset 5 ml (medisch hulpmiddel)
- Nagellak 8 ml (cosmetisch product)

Mycosan Behandel + Camoufleur is speciaal ontwikkeld voor de effectieve behandeling van kalknagels en om direct de verkleurde nagel er mooier uit te laten zien, wanneer u dit nodig heeft. De ideale oplossing voor de effectieve behandeling van kalknagels als u open schoenen of slippers wilt dragen.

Indicatie voor gebruik

Mycosan Kalknagel Behandelset behandelt kalknagels aan vingers en tenen (*witte oppervlakkige onychomycose (WSO) & distale laterale subunguale onychomycose (DLSO)*) veroorzaakt door schimmels zoals *T. rubrum*, *T. mentagrophytes* en *E. floccosum*. Onychomycose is een schimmelinfectie van de nagel die verkleuring, verdikking en scheiding van het nagelbed veroorzaakt. U moet kalknagels serieus behandelen om verdere besmetting of ergere klachten te voorkomen.

Gebruiksdoel

Mycosan Kalknagel Behandelset is bedoeld om een bescherm laagje op de nagel te vormen die de groei van de schimmels remt, die betrokken zijn bij schimmelinfecties, met behulp van verzuring.

Waarom Mycosan Kalknagel Behandel + Camoufleur gebruiken?

- ✓ **Gepatenteerd serum:** bewezen effectief tegen schimmels, het stopt de ontwikkeling van schimmels die kalknagels veroorzaken.
- ✓ **Precisie kwast:** voor de juiste dosering op de moeilijk bereikbare plekken.
- ✓ **10 x nagelvijl:** voor een betere werking. Door het vijlen bereikt het serum de schimmel beter.
- ✓ **Natuurlijke ademende nagellak:** camoufleert verkleuringen direct.
- ✓ **Geschikt:** voor diabetici en kinderen vanaf 4 jaar.

GEbruIK:



1) ACTIEVE BEHANDELING:

maak voor een succesvol resultaat de volledige behandeling altijd af!

Reinig en droog de nagels voor gebruik en indien nodig, verwijder alle sporen van nagellak. Gedurende 4 weken 2 x daags een kleine druppel serum aanbrengen op de kalknagel. Een kleine druppel is voldoende. Laat het serum 1 minuut drogen. Na 4 weken het serum 1 x daags aanbrengen tot het aangetaste deel van de nagel volledig is uitgegroeid. **LET OPI!** Knijp zachtjes in de tube.



2) NATUURLIJKE NAGELLAK

Aanbrengen zodra serum volledig droog is. Aanbrengen wanneer het camoufleren van verkleuring van de kalknagel gewenst is. Indien nodig, herhalen. **LET OPI!** Deze nagellak is geen behandeling voor kalknagelinfecties en geen medisch hulpmiddel.



3) VIJLEN IS BELANGRIJK!

Na het behandelen van de nagel gedurende één week, vijl voorzichtig de overtollige dikte van het aangetaste oppervlak weg met de bijgeleverde nagelvijlen, één keer per week. Door de nagel te vijlen, zal het serum gemakkelijker doordringen in de nagel voor optimaal resultaat. **LET OPI!** Elke vijl slechts eenmaal gebruiken om verspreiding van de infectie te voorkomen.

Het Mycosan Kalknagel serum heeft een 3-voudige werking:

1. Effectief

De doelgerichte werking stopt snel de ontwikkeling van de schimmel die de kalknagel veroorzaakt.

2. Herstelt de nagel

Het product dringt door in de nagel en verbetert de structuur waardoor de natuurlijke staat van de nagel wordt hersteld.

3. Verbetert de conditie van de nagel

Het helpt tegen verkleuring van de nagel.

Ingrediënten Mycosan Kalknagel:


Aqua, rye ferment filtrate, pentylene glycol, dimethyl isosorbide (1.5%), hydroxyethylcellulose (0.7%).

Ingrediënten Mycosan Natuurlijke Nagellak (cosmetisch product):

Butylacetate, Ethyl acetate, Nitrocellulose, Adipic acid/neopentyl glycol/trimellitic, anhydride copolymer, Acetyl tributyl citrate, Isopropyl alcohol, Silica, Stearalkonium hectorite, Trimethylsiloxysilicate, Dimethicone, Titanium dioxide/Ci 77891, Citric acid, Red 6 Lake/Ci 15850.

Vijl de nagel, breng Mycosan Kalknagel serum aan en laat het drogen. **[FIG. 01]**


FIG.01 Stapsgevijs proces voor het gebruik van Mycosan Kalknagel Behandelset

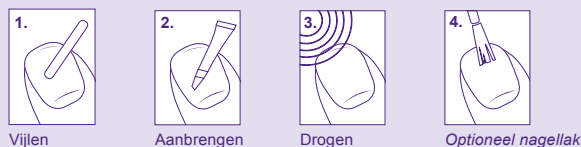

Nageltekening om voortgang te volgen

Om voortgang van de nagel te volgen, maak maandelijks een potloodaantekening van het door de schimmel aangetaste gebied op onderstaande diagram. **[FIG. 02 – nagel tekening]**

FIG.02 Nageltekening om voortgang te monitoren

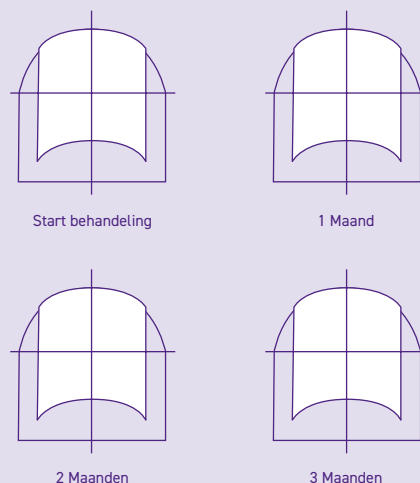

**Beindatum
behandeling**

[illegible]

NB. Kruis het schema (x) elke keer wanneer u uw nagel hebt behandeld of gevild

- Voor een succesvol resultaat, is het van belang om het behandelingschema consistent te volgen.
- Gebruik bovenstaand schema om uw verbetering bij te houden.
- Ook al is verbetering in de eerste maand niet zichtbaar, betekent dit niet dat de behandeling niet werkt. Menselijke nagels groeien langzaam en het kan 6 tot 9 maanden duren voordat het aangetaste gebied volledig is uitgegroeid. Behandeling van de nagel consequent en volg uw voortgang met behulp van de nageltekening.

Stop onmiddellijk met de behandeling als u tekenen van irritatie ziet. Raadpleeg uw huisarts als de problemen blijven bestaan.

Voorzorgsmaatregelen:

- Uitsluitend bedoeld voor lokaal, uitwendig gebruik alleen op vinger- en teennagels.
- Indien u zwanger bent of borstvoeding geeft dient u Mycosan Kalknagel alleen te gebruiken onder toezicht en op aanraden van een arts.
- Buiten bereik van kinderen bewaren.
- Mycosan Kalknagel dient niet gebruikt te worden in geval van overgevoeligheid voor één van de ingrediënten.
- Gebruik Mycosan Kalknagel alleen bij uzelf om besmetting van anderen te voorkomen.
- Knijp voorzichtig in de tube en sluit de tube na gebruik.

- Droog handen en voeten na het wassen altijd goed af, ook tussen de vingers en tenen.
- Houd nagels kort en voorkom nagelbijten, dit maakt de nagels kwetsbaar voor schimmels.
- Draag iedere dag schone, vocht opnemende sokken en wissel ze regelmatig bij overmatige transpiratie.
- Wissel schoenen regelmatig, tussentijds goed luchten c.q. drogen en vermijd het continu dragen van kunstleren of sportschoenen.
- Kies goed passende schoenen die niet te smal of te krap zijn zodat uw voeten goed kunnen ademen.
- Draag altijd slippers op plaatsen die collectief gebruikt worden (kleedkamers, zwembaden, sauna's, enzovoort).
- Gebruik bij een schimmelinfectie van de huid (voetschimmel), een schimmeldodend product. In dit geval wordt aangeraden schoenen en sokken met een schimmel bestrijdend middel te behandelen en een aparte handdoek te gebruiken.

A thermometer with a scale from 5°C to 25°C. The liquid level is at 15°C.

Niet in de koelkast of vriezer bewaren.
Buiten bereik van kinderen houden.



Houd de tube uit de buurt van zonlicht.



Na gebruik kunnen de tube, de bijsluiter en het doosje met het normale huisafval worden weggedaan.



Per person,
meervoudig gebruik

Mycosan nagellak is bedoeld voor cosmetisch gebruik en is geen medisch hulpmiddel.



Serrix B.V.
Herengracht 458
1017 CA Amsterdam
Nederland



Serrix Nederland B.V.
Herengracht 458
1017 CA Amsterdam
Nederland
+31203378703
info@serrix.com